


Protocollo chirurgico

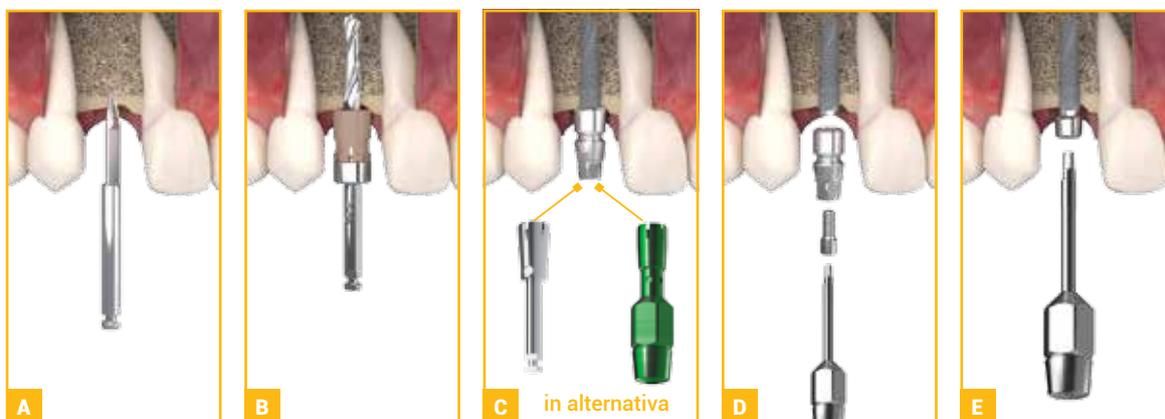

- Dopo l'apertura del lembo chirurgico si procede all'incisione della corticale mediante l'uso della fresa dedicata (Cod. P10SD).
- Per la perforazione del tessuto osseo si utilizza un'unica fresa calibrata (Cod. P1PD) dotata di stop di profondità presente all'interno del kit chirurgico.
- L'avvitamento del P129 si effettua prelevando l'impianto dal suo alloggiamento (Holder in Peek) presente all'interno della confezione, utilizzando la chiave da manipo (Cod. P1KC) o da cricchetto dinamometrico (Cod. P1KMC1). Si raccomanda di avvitare stabilizzando l'impianto con un torque massimo di 50 Ncm.
- Una volta completato l'avvitamento nel sito impiantare, liberare il montatore* con l'apposita chiave (Cod. P1PDSA).
- Procedere all'avvitamento della vite chirurgica di chiusura con la stessa chiave (Cod. P1PDSA). Se si volesse ottenere un utilizzo trans mucoso di P129, sono disponibili viti di guarigione di altezza mm 4.5 che possono essere utilizzate in alternativa alla vite chirurgica inclusa nella confezione.

*Disponibile a richiesta chiave a forchetta (Cod. P1KM) per la rimozione del montatore.

KIT chirurgico

CRICCHETTO DINAMOMETRICO



FRESA OSSIVORA



PERFORATORE PILOTA (FRESA CALIBRATA)



CHIAVE DA CRICCHETTO DINAMOMETRICO



CHIAVE DA MANIPOLO PER IMPIANTI




CHIAVE CORTA



STOP IN PEEK

P1DRST08 P1DRST10 P1DRST12 P1DRST14

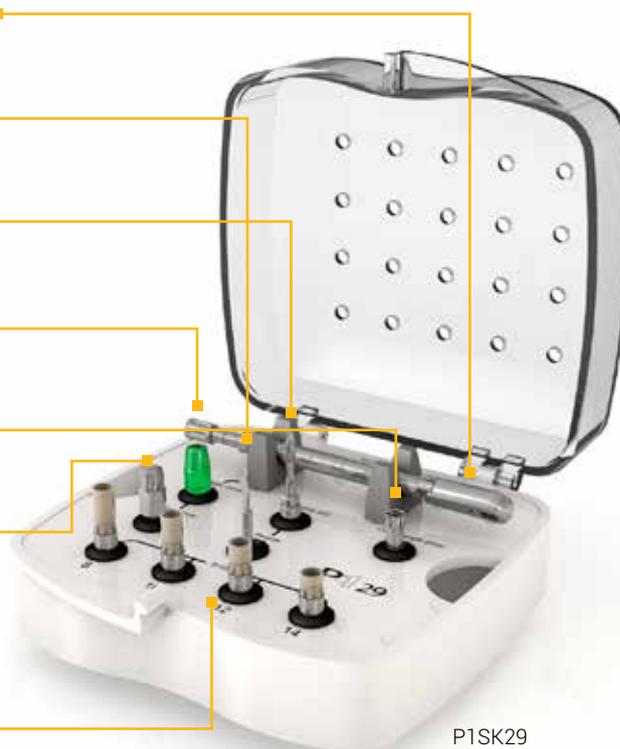

P1SK29