

Protocollo chirurgico

Fresa Ø mm 1.50 - Per impianti Ø mm 2.0 (osso corticale D1-D2) e impianti Ø. 2.40 (osso spongioso D3)

Fresa Ø mm 2.00 - Per impianti Ø mm 2.50 (osso corticale D1-D2)

In caso di osso particolarmente morbido o di scarsa qualità, perforare per circa 1/3 della lunghezza dell'impianto e procedere all'inserimento completo su tessuto integro.



- Segnare ogni punto di entrata sul tessuto del paziente con la **fresa pilota** 1.5 portandola su e giù fino a quando il piatto corticale non viene penetrato.
- Portare l'impianto al sito con il **montatore in plastica** ed avvitarlo sino a notare una resistenza ossea.
- Usare la **chiave a farfalla per inserire l'impianto**. Qualora l'inserimento fosse difficoltoso è possibile utilizzare il **cricchetto dinamometrico**.
- Il **cricchetto dinamometrico** completa l'avvitamento dell'impianto.
- Scavare la protesi per **alloggiare le matrici in metallo** da posizionare sugli impianti.
- Ribasare la protesi** in bocca al paziente con **resina a freddo** facendogli applicare la pressione di un morso normale in occlusione centrica.

KIT chirurgico

CRICCHETTO DINAMOMETRICO

P1KWD



FRESA DI PREPARAZIONE

P1DR15 (Ø 1.5)



P1DR20 (Ø 2)



CHIAVE A FARFALLA

P1KB



CHIAVE PER CRICCHETTO DINAMOMETRICO

P1KN1L (Lunga)



P1KN1C (Corta)

